

# Conozca ClearControl™

Características clínicas que le ayudarán  
a una **planeación enfocada** en las  
**necesidades** de sus pacientes.



**clearcorrect**

A Straumann Group Brand

# ClearControl™


## Engagers Estándar

Son aditamentos hechos con resina que se colocan en el esmalte del diente para crear superficies activas y mejorar el control del movimiento dental.



### Engagers con bisel extendido

Desarrollados para abordar movimientos complejos específicos y mejorar su previsibilidad en rotaciones y extrusiones.

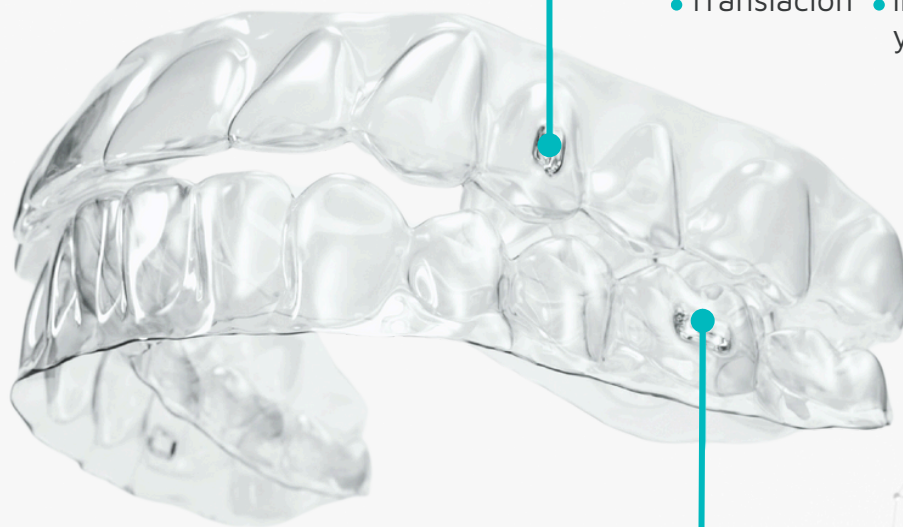

#### Vertical

- Tipping
- Rotación
- Translación
- Intrusión y extrusión

#### Horizontal

- Torque
- Retención / Anclaje en molares o premolares
- Extrosión
- Intrusión

Los engagers están disponibles en:

Tamaños	Profundidades	Orientación
2,3,4 mm	1.00 y 1.25 mm	Horizontal / Vertical

# ClearControl™

## Características personalizables

### Rampa de mordida anterior



#### Ubicación

- Incisivos centrales y laterales
  - Incisivos caninos
  - Caninos

#### Tamaño

- 3 o 5 mm de profundidad

### Rampa de mordida posterior



#### Ubicación

- Molares inferiores 6's y 7's
- Premolares y molares inferiores
  - Premolares y molares superiores e inferiores

#### Tamaño

- Primeros molares y premolares 2 mm
- Segundos molares 1.5 mm

# ClearControl™

## Características personalizables



### Pónticos

Es un marcador de posición en forma de diente en el alineador creado en el espacio edéntulo de un diente perdido.

Se ve de color gris translúcido durante la planificación en Clearpilot™ y debe rellenarse con resina para conservar la estética durante el tratamiento ortodóntico.



### Guía de erupción

Diseñadas para mantener el espacio en la arcada de un diente próximo a erupcionar, su diseño tiene forma de diente.



### Barras

Tiene una función similar a los pónticos, éstas se utilizan para espacios edéntulos más grandes, en especial en los segmentos posteriores, las barras le dan prioridad a la funcionalidad y la estabilidad del alineador sobre la estética del paciente.

Se ven como una barra de color gris translúcido durante la planificación en Clearpilot™.


\*Tanto pónticos, barras y guías de erupción pueden cambiar de tamaño cada 2 etapas.

# ClearControl™

## CutOuts

### Recorte en doble slit

Crearán un gancho de inserción para elásticos intermaxilares.

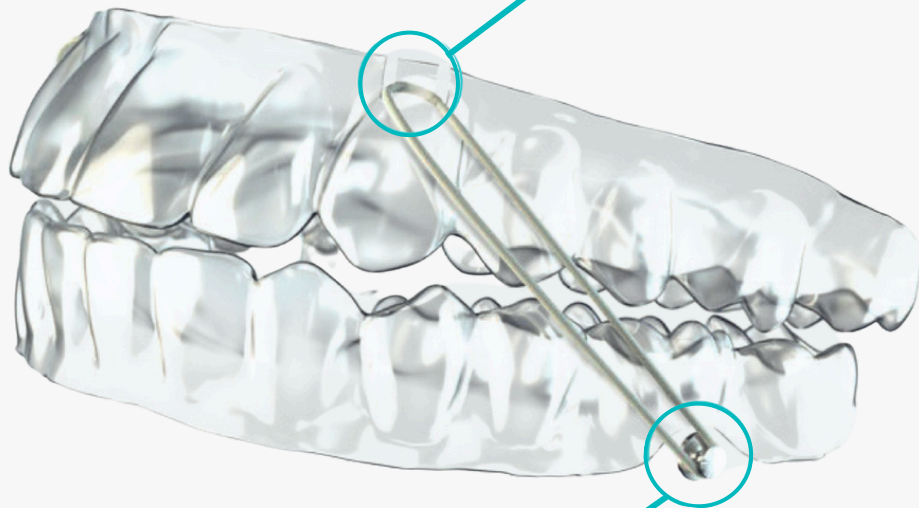

### Recorte de media luna

Para cementación de botón o brazo de poder.

**clearcorrect**

A Straumann Group Brand

# Socios de Ortodoncia por Excelencia

## Unidos por las sonrisas

Para mayor información visita [clearcorrect.mx](http://clearcorrect.mx)



@clearcorrectmx

